
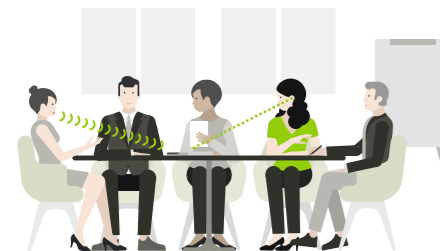



4

Table | Tisch | Table | Tafel

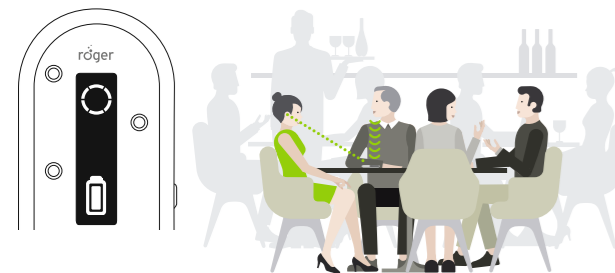



5

Pointing | In der Hand | Dans la main | In de hand

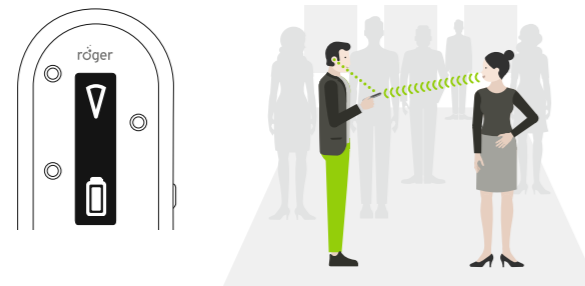

6

Presenter | Sprecher | Locuteur | Spreker

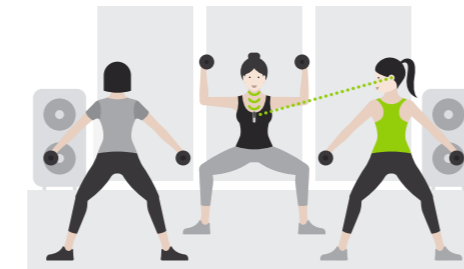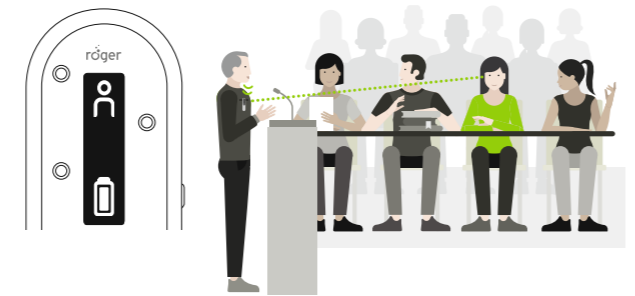

7

TV | Fernsehen | TV | Televisie



i

myRogerMic App



The Apple App Store logo is a trademark of Apple Inc. The Google Play store logo is a trademark of Google LLC.

For further information, please refer to the User Guide. | Weitere Informationen zur Anwendung finden Sie in der Gebrauchsanweisung. | Pour plus d'informations, veuillez vous référer aux instructions d'utilisation. | In de gebruiksaanwijzing vindt u meer gedetailleerde informatie.

www.phonak.com/roger-on

Models: Roger On, Roger On iN



Manufacturer: Phonak Communications AG Herrenschwandweg 4 CH-3280 Murten Switzerland www.phonak.com



A Sonova brand

Roger On™

Quick setup guide | Schnellstartanleitung Guide d'installation rapide | Snel aan de slag




029-3270V1.00/2020-08/CL © 2020 Phonak Communications AG All rights reserved


PHONAK life is on



Content | Inhalt | Contenu | Inhoud

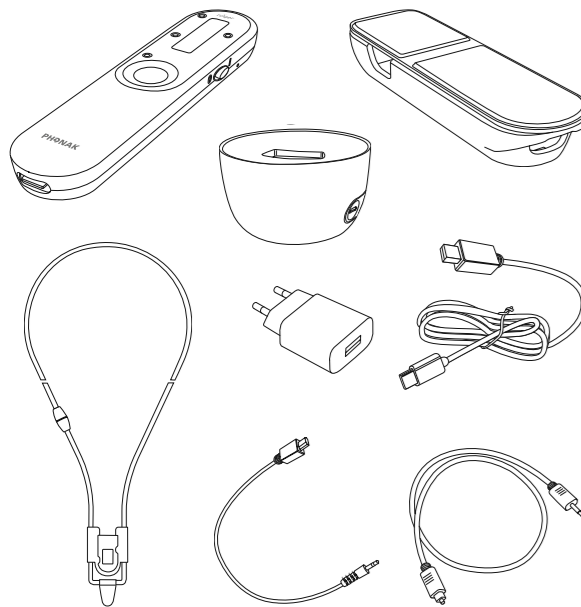

Function button | Funktionstaste |
Touche de fonction | Functieknop

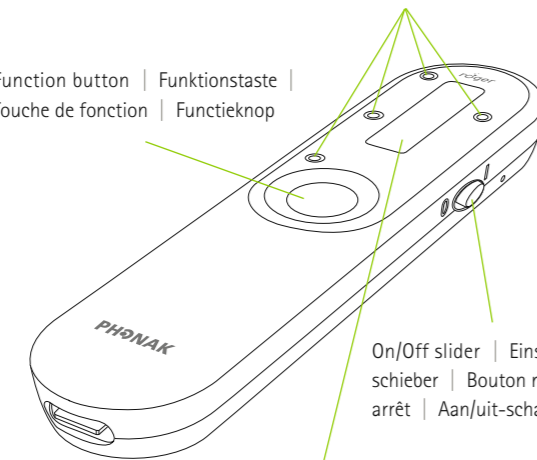


Display | Anzeige | Écran | Scherm

4 microphones | 4 Mikrofone |
4 microphones | 4 microfoons

On/Off slider | Einschalt-
schieber | Bouton marche/
arrêt | Aan/uit-schakelaar



Connect button | Verbindungstaste |
Bouton d'appairage | Verbindingsknop

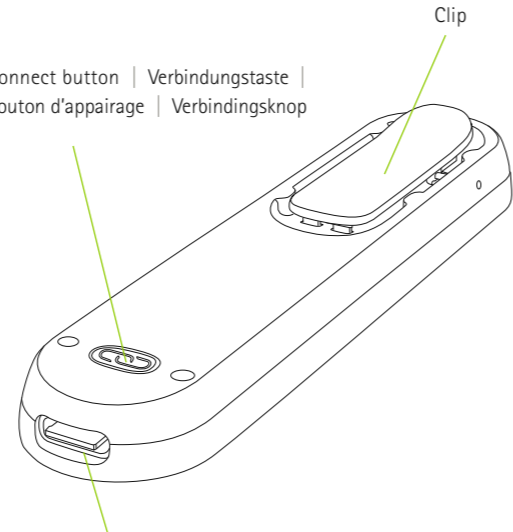

Charging input | Ladeanschluss |
Prise de recharge | Charging input

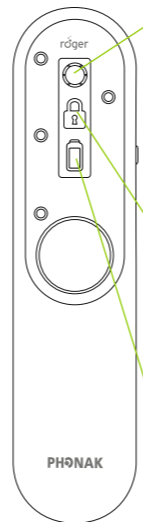


Table | Tisch | Table | Tafel

Pointing | In der Hand | Dans la main |
In de hand

Presenter | Sprecher | Locuteur | Spreker

Mute | Stumm | Muet | Dempfen

Automatic | Automatisch

Locked | Gesichert | Barré | Op slot

Audio


~8h

~4h


Charge! | Laden! | Chargez! | Laden!





Charging | Aufladen | Charger | Laden

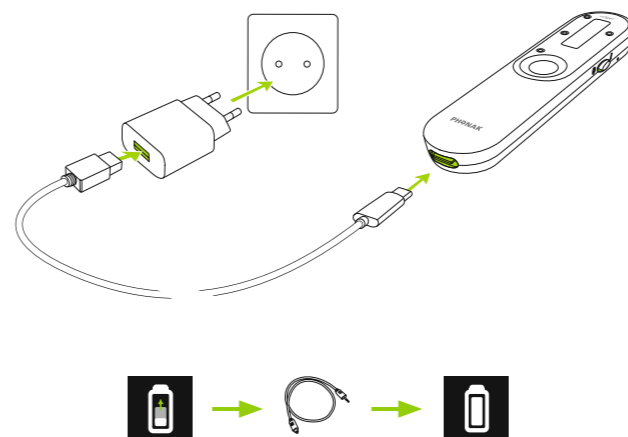


Switching on | Einschalten | Mettre en marche |
Inschakelen

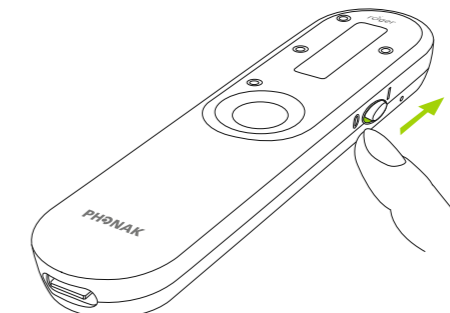

Connecting | Verbinden | Connecter |
Verbinden

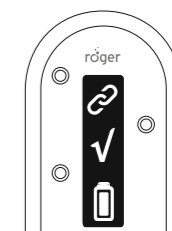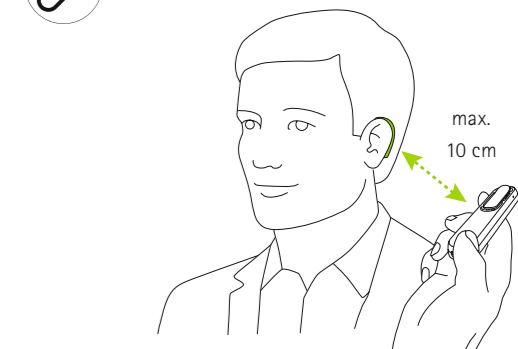

Done | Erledigt |
Terminé | Gedaan

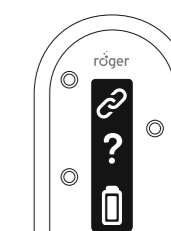

Go closer | Gehen Sie näher heran |
Va plus près | Kom dichterbij